

LD-300, LD-301, LD-302

Little Doctor®

CZE TEPLOMĚR LÉKAŘSKÝ DIGITÁLNÍ LD. NÁVOD K POUŽITÍ

S pomocí teploměru LD můžete rychle, přesně a bezpečně měřit teplotu lidského těla.

Tento teploměr je určen pro měření teploty lidského těla POUZE těmi způsoby, které jsou uvedeny v následujícím návodu k použití.

Technická charakteristika

Rozpětí měření teploty, °C	35.5 - 42.0
Rozpětí indikace teploty, °C	32.0 - 42.0
Metoda měření	Metoda stanovení maxima
Hranice přípustné absolutní chyby při měření teploty, °C	±0.1
Senzitivní prvek	Termistor
Indikace	Displej z tekutých krystalů s indikací do deseti bodů
Jednotky teploty	Stupně Celsia (°C)
Zvukový signál	Po ukončení měření
Paměť	Poslední měření
Napětí elektrického napájení, V	1,5
Typ elektrického napájení	1 napájecí baterie LR41
Maximální výkon, mW	0,15
Životnost napájecí baterie	Okolo 100 hodin měření
Automatické vypnutí	10 minut po ukončení měření

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Vodotěsná část teploměru u modelu LD-300 je označena na obrázku (2). Vyvarujte se kontaktu s vodou u dalších částí přístroje. Vodotěsný kryt teploměru u modelů LD-301 a LD-302 se může ponořit do hloubky maximálně 16 cm a na maximální dobu 30 minut.
- Teploměr je určen pro měření teploty v podpaží, orálně nebo rektálně.
- Drobné součástky se nesmí ze zdravotních a bezpečnostních důvodů dostat do rukou dětí. Používat pouze za přítomnosti dospělého!

POSTUP MĚŘENÍ, PAMĚŤ

- Zapněte napájení stisknutím tlačítka (4).
- Při stisknutí tlačítka na displeji (3) se rozsvítí všechny položky tak, jak zobrazuje obrázek napravo. To znamená, že je teploměr připraven k použití.
- Pusťte prst z tlačítka. Na displeji se zobrazí výsledek posledního měření. Poté se rozsvítí symboly "L °C", přičemž symbol "°C" by měl blikat.
- Vložte čidlo teploměru (1) v podpaží (nebo na jiné místo tak, jak je uvedeno v části Způsoby měření teploty).
- Pokud je teplota těla vyšší než 32.0°C, na displeji se místo "L °C" objeví hodnota teploty a značka "°C" bude blikat po celou dobu měření.
- Pokud se zobrazené hodnoty teploty nebudou měnit v horizontu 16 sekund, značka "°C" přestane blikat a zazní zvukový signál. Doba měření závisí na vybraném způsobu měření (viz část Způsoby měření teploty). Při přesném dodržení kroků z části Způsoby měření teploty ohlásí zvukový signál ukončení měření. V případě pochybností ohledně výsledku navyšte pro přesnější hodnotu dobu měření o 2-3 minuty poté, co zazní zvukový signál. Pokud bude naměřená teplota nižší než 32°C, bude na obrazovce neustále rozsvícen symbol "L °C". Pokud bude naměřená teplota vyšší než 42°C, rozsvítí se na obrazovce symbol "H °C".
- Výsledek měření teploty bude na displeji svítit až do té doby, než teploměr vypnete.
- Vypněte teploměr stisknutím tlačítka (4).
- Pokud teploměr nevypnete, automaticky se vypne přibližně za 10 minut.

ZPŮSOBY MĚŘENÍ TEPLoty

ORÁLNÍ MĚŘENÍ

Vložte čidlo teploměru do hygienického sáčku (prodává se samostatně). Před měřením teploty mějte ústa zavřená po dobu 5 minut. Vložte čidlo pod jazyk, jazykem jej přidržíte a poté zavřete ústa. Tímto způsobem se teplota měří okolo 1 minuty.

REKTÁLNÍ MĚŘENÍ


Opatrně vsuňte pouze špičku teploměru do konečníku a to ne hlouběji než 2,5 cm. Tímto způsobem se teplota měří okolo 1 minuty.

MĚŘENÍ V PODPAŽÍ


Před měřením utřete suchým ručníkem pot v podpaží a nechte ruku volně spuštěnou přibližně 5 minut. Vložte čidlo do podpaží a pevně přitiskněte ruku. Tímto způsobem se teplota měří 3 – 4 minuty.

UPOZORNĚNÍ! Rektální teplota může být o 1 stupeň vyšší než orální a měření v podpaží naopak o 1 stupeň nižší než orální. Konzultaci na toto téma proveďte se svým lékařem.

VÝMĚNA NABÍJECÍ BATERIE

Jestliže napětí nabíjecí baterie bude nevyhovující pro správné fungování teploměru (méně než 1,4 V), objeví se na obrazovce symboly «», které informují o nutnosti její výměny.

- Otevřete umístění nabíjecí baterie (5) a to zatáhnutím za kryt v opačném směru než je čidlo.

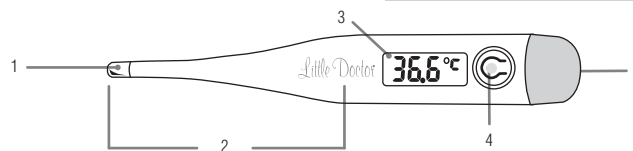

Celkové rozměry:	
Rozměr (bez pouzdra), mm	129 x 18 x 10 (LD-300 a LD-301), 129 x 19 x 10 (LD-302)
Hmotnost (bez pouzdra), g	10 (LD-300), 8 (LD-301), 12 (LD-302)
Vybavení	Teploměr s napájecí baterií, umělohmotné pouzdro, návod k použití, obal
Doporučená doba mezi kontrolami přístroje	ne více než 2 roky
Rok výroby	Uveden v čísle LOT (první 4 cifry) na zadní straně krytu teploměru.
Podmínky používání:	
teplota okolního vzduchu, °C	od +10 do +35 stupňů
relativní vlhkost, %Rh	ne více než
Podmínky skladování:	
teplota okolního vzduchu, °C	od -25 do +55 stupňů
relativní vlhkost, %Rh	ne více než

- Vysuňte starou baterii. Nepoužívejte ostré kovové předměty.
- Vložte novou baterii a zkontrolujte její správnou polohu: plus směruje nahoru, minus dolů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který je předán kupujícímu při prodeji tohoto přístroje. Adresy organizací, provádějících záruční servis jsou uvedeny v odstavci «VÝROBCE A ZPLNOMOCNĚNÍ ZÁSTUPCÍ» nebo na internetu na webu www.LittleDoctor.sg.

VÝROBCE A ZPLNOMOCNĚNÍ ZÁSTUPCÍ

Vyrobena pod kontrolou a pro Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591, Singapore, adresa pro korespondenci: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699).

Výrobce: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Distributor v Evropské unii: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Více informací najdete na www.littledoctor.sg

Záruční list

Model	Datum prodeje
Sériové číslo	Záruční doba
Jméno kupujícího	
Podpis prodejce	Pečeť (razítko) prodávajícího

Vyplňuje zástupce autorizovaného servisního střediska.

Datum	Servisní poznámky

Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China
Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

