


# MEDICININIS SKAITMENINIS TERMOMETRAS LD NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## Modeliai LD-300, LD-301, LD-302

Little Doctor®

Termometru galite greitai, tiksliai ir saugiai išmatuoti žmogaus kūno temperatūrą. Palyginus su tradiciniu gyvsidabrio termometru, šiame termometre yra ekranas, kuriame lengvai įskaityti rodomus matavimo rezultatus, taip pat yra paskutinio matavimo atmintis ir garso signalas. Sudėtyje nėra gyvsidabrio, todėl jį saugu naudoti ir jis nekenkia aplinkai. Termometrą galima naudoti tiek namuose, tiek gydymo įstaigose. Matuojant temperatūrą, reikia atsiminti, kad vidutinė normali kūno temperatūra gali svyruoti nuo 36,1 °C iki 37,2 °C. Paprastai temperatūra ryte yra žemesnė nei vakare. Norėdami nustatyti savo normalią kūno temperatūrą, kelias dienas matuokite temperatūrą ryte ir vakare.

Šis termometras yra skirtas TIK žmogaus kūno temperatūrai matuoti šioje naudojimo instrukcijoje nurodytais būdais.

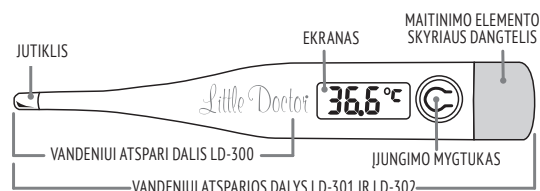

### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Temperatūros matavimo diapazonas, °C	32.0-42.0
Temperatūros indikacijos diapazonas, °C	32.0-42.0
Matavimo metodas	Maksimalios reikšmės nustatymo metodas
Leistinos absoliučiosios paklaidos ribos, matuojant temperatūrą, °C	±0.1
Jutiklinis elementas	Termistorius
Indikacija	Skystųjų kristalų ekranas su indikacija iki dešimtųjų dalių
Matavimo vienetai	Celsijaus laipsniai (°C)
Garso signalas	Baigus matuoti
Atmintis	Paskutinis matavimas
Elektros maitinimo įtampa, V	1,5
Elektros maitinimo tipas	1 LR41 maitinimo elementas
Didžiausias energijos suvartojimas, mW	0,15
Maitinimo elemento veikimo laikas	Apie 100 matavimo valandų
Automatinis išsijungimas	Po 10 minučių pabaigus matuoti

Matmenys: Dydis (be dėklo), mm Svoris (be dėklo), g	129x18x10 (LD-300), 129x18x11 (LD-301), 129x19x11 (LD-302) 10 (LD-300), 8 (LD-301), 11 (LD-302)
Pakuotės turinys	Termometras su maitinimo elementu, plastikinis dėklas, naudojimo instrukcija, pakuotė
Rekomenduojama tikrinti	ne rečiau kaip kas 2 metus
Pagaminimo ir pakavimo metai ir mėnuo	Yra nurodyti LOT numeris (pirmieji du skaičiai - metai, antrieji - mėnuo). LOT numeris yra nurodytas galinėje termometro korpuso pusėje.
Naudojimo sąlygos: aplinkos oro temperatūra, °C, santykinė drėgmė, % Rh	nuo +10 iki +35 15 - 85
Laikymo sąlygos: aplinkos oro temperatūra, °C, santykinė drėgmė, % Rh	nuo -25 iki +55 15 - 85

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Vandeniui atspari LD-300 termometro dalis yra pažymėta paveikslėlyje. Saugokite nuo vandens kitas prietaiso dalis. Vandeniui atsparus termometrus LD-301 ir LD-302 modelių korpusus leidžia juos panardinti į vandenį ne daugiau kaip 16 cm gylyje, ne ilgiau kaip 30 minučių.
- Termometras skirtas matuoti temperatūrą pažastyje, oraliu arba rektaliniu būdu.
- Laikykitės smulkių detalių vaikams nepasiekiamose vietose. Tai pavojinga jų sveikatai.
- Įdėkite termometro jutiklį į pažasties įdubą (arba kitur, kaip aprašyta skyriuje „Temperatūros matavimo būdai“).
- Jei kūno temperatūra yra aukštesnė nei 32,0 °C, ekrane vietoje „L °C“ bus rodoma temperatūra, „°C“ žymeklis mirksės visą laiką matuojant temperatūrą.
- Kai temperatūra nesikeis 16 sekundžių, „°C“ žymeklis nustos mirksėti ir pasigirs garso signalas. Matavimo laikas priklauso nuo pasirinkto matavimo būdo (žr. Skyrių „Temperatūros matavimo būdai“). Tiksliai laikantis skyriaus „Temperatūros matavimo būdai“ reikalavimų, garsinis signalas praneša apie matavimo pabaigą. Jei kyla abejonių dėl rezultato, tikslėniam matavimui palaikykite termometrą dar 2-3 minutes po garso signalo. Jei išmatuota temperatūra yra mažesnė nei 32 °C, ekrane bus rodoma „L °C“. Jei išmatuota temperatūra yra didesnė kaip 42 °C, ekrane pasirodys simbolis „H °C“.
- Temperatūra bus rodoma ekrane tol, kol termometras išsijungs.
- Išjunkite termometrą paspausdami jungimo mygtuką.
- Jei termometro neišjungs, maždaug po 10 minučių jis išsijungs automatiškai.

188.8 °C

### TEMPERATŪROS MATAVIMO BŪDAI

#### ORALINIS MATAVIMAS


Įdėkite jutiklį į higieninį maišelį (parduodamas atskirai). Prieš matuodami temperatūrą, palaikykite burną užtiotą 5 minutes. Padėkite jutiklį po liežuvio ir prilaikykite jį. Užtiotkite burną. Tokiu būdu temperatūra matuojama maždaug 1 minutę.

#### REKTALINIS MATAVIMAS

Atsargiai į tiesiąją žarną įkiškite tik termometro galiuką. Nekiškite jo giliau nei 2,5 cm. Tokiu būdu temperatūra matuojama maždaug 1 minutę. Matuojant naudokite bet kokį higienos maišelį (parduodamas atskirai).

#### PAŽASTINIS MATAVIMAS

Prieš matuodami temperatūrą, sausai nušluostykite pažasties įdubą. Įdėkite matavimo antgalį į pažasties įdubos vidurį (1 pav.). Prispauskite termometro galiuką petimi, kad kampas su petimi būtų 35-45 laipsniai (2 pav.). Tokiu būdu temperatūra matuojama 3-4 minutes.

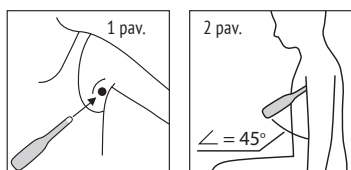

**DĖMESIO!** Rektalinė temperatūra gali būti 1 laipsniu aukštesnė nei oralinė temperatūra, o temperatūra pažastyje gali būti 1 laipsniu žemesnė nei oralinė temperatūra. Dėl atsakymų į visus šiuos klausimus kreipkitės į gydytoją. Nematukite temperatūros nepaėjus 30 minučių po valgio, bėgimo, sporto ar vonios, nes Jūsų kūno temperatūra gali būti padidėjusi. Temperatūrą reikia matuoti ilgiau, jei Jūs geriate vandenį ar kalbėjote prieš matuojant oraliu būdu, arba jei pažasties sritis buvo atvira prieš matuojant pažastiniu būdu.

### PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, REMONTAS IR ATLIKŲ TVARKYMAS

- Saugokite termometrą nuo didelės drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, smūgių, vibracijos.

- Nelaikykite ir nenaudokite termometro šalia šildymo prietaisų ir atviros ugnies.
- Jei termometras buvo laikomas esant neigiamai temperatūrai, prieš naudojimą palaikykite jį šiltoje vietoje mažiausiai 1 valandą.
- LAIKYKITE MAITINIMO ELEMENTUS VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!**
- Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ir nemėtykite jo.
- Termometre nėra matavimo tikslumo nustatymo valdikių. Nebandykite patys išardyti termometro. Iškilus poreikiui remontuokite prietaisą tik specializuotose servisuose.
- Utilizuokite termometrą pagal Jūsų regione šio metu galiojančias taisykles. Specialių šio prietaiso utilizavimo sąlygų gamintojas nenustatė.
- LAIKYKITE TERMOMETRĄ PLASTIKINIAME DĖKLE.**

### DEZINFEKAVIMAS IR SANITARINIS APDOROJIMAS

Neterškite termometro ir saugokite jį nuo dulkių. Vandeniui atsparią termometro dalį galima valyti ir dezinfekuoti 3% vandenilio peroksido tirpalu. Niekada nenaudokite benzino turinčių tirpalų, tirpiklių, verdančio vandens ar sterilizatorių.

### MAITINIMO ELEMENTO KEITIMAS

Jei maitinimo elemento įtampa tampa nepakankama termometru naudoti (mažesnė nei 1,4 V), ekrane pasirodys „“ piktograma, kuri reiškia, kad reikia pakeisti maitinimo elementą.

- Atidarykite maitinimo elemento skyrių patraukdami dangtelį link priešingos jutiklio pusės.
- Išimkite seną maitinimo elementą. Maitinimo elementui išimti nenaudokite aštrių metalinių daiktų.
- Įdėkite naują maitinimo elementą, įsitikindami, kad poliai yra teisingo padėtyje: plusas turi būti nukreiptas į viršų, minusas turi būti nukreiptas žemyn.

### GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam termometru suteikiamas garantinis terminas - 24 mėnesiai nuo pardavimo dienos (Garantinis terminas yra nurodytas prekės garantiniame talone). Garantija netaikoma prekėms, kurios sugedo ir (arba) kurių defektai atsirado dėl: netinkamo naudojimo ar pagal paskirtį; jei pažeidimai atsirado dėl neatsargaus naudojimo; jei buvo pakeista prietaiso konstrukcija; prietaisą išardė ir/arba

sutaisė neįgalota įmonė (privatus asmuo), dėl naudojimo ir/arba laikymo, ir/arba gabenimo taisyklių pažeidimo; dėl trečiųjų asmenų arba nenugalimos jėgos veiksmų. Maitinimo elementui garantija netaikoma. Paprašykite pardavėjo, kad užpildytų garantinį taloną termometro pirkimo metu.

### SYMBOLIŲ REIKŠMĖ

- CE0123 Atitinka Direktyvą 93/42/EEC Saugoti nuo drėgmės
- Atstovas Europos Sąjungoje Partijos numeris
- Svarbu: Perskaitykite instrukciją Serijos numeris
- BF tipo darbinė dalis Naudojimo sąlygos
- Gamintojas Utilizuokite prietaisą pagal Jūsų regione galiojančias taisykles

Šios Naudojimo instrukcijos redakcijos data nurodyta apatiname kampe iš dešinės, kaip EXXX/YYMM/NN, kur YY - metai, MM - mėnuo, NN - redakcijos numeris.

### INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMĄ IR REGISTRACIJĄ

Prietaisu gamyba atitinka tarptautinį standartą ISO 13485. Prietaisas atitinka Europos direktyvą MDD 93/42/EEC.

**Oficialus atstovas ES:** Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland. Tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, faksas: +48 12 2684753, biuro@littledoctor.pl

Pagaminta kontroliuojant ir skirta Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 19959.

**Pašto adresas:** Yishun Central, P.O. Box 9293, Singapore 917699.

Faksas: +65 62342197, el. paštas: info@littledoctor.sg

**Gamintojas:** Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No. 8 Tongxing Road Economic and Technical Development Area Nantong Jiangsu, Kinija.

**EC-REP:** Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390, Lenkija.

**LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.**

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699, Fax: 65-62342197, E-mail: info@littledoctor.sg

### Little Doctor® GARANTINIS TALONAS

MODELIS	SERIJOS NUMERIS	GARANTINIS TERMINAS
PIRKĖJO VARDAS	PIRKĖJO PARĄŠAS	
DATA	PARDAVĖJO PARĄŠAS	
JRAŠAI APIE GARANTINĘ PRIEŽIŪRĄ		PREKYBOS ORGANIZACIJOS ANTSPAUDAS