


## Návod na použitie

## ! DÔLEŽITÉ!

Pred použitím stetoskopu si pozorne prečítajte tento Návod na použitie.


## Názov častí a komponentov

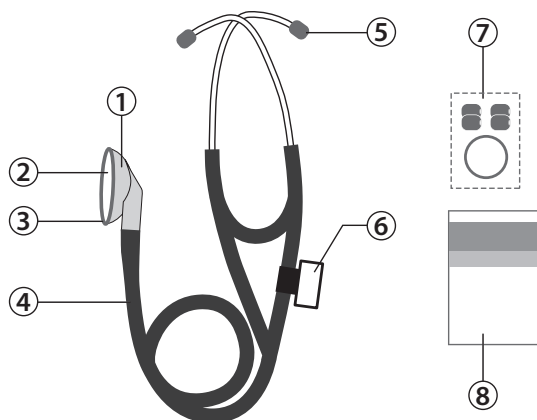

1. Hlava do stetoskopu
2. Membrána pre stetoskop
3. Plastový krúžok
4. Lekárska spojovacia trubica s vnútornou pružinou a vstavanou binaurálnou trubicou
5. Ušné vložky (olivky)
6. Menovka
7. Dodatočná sada príslušenstva
8. Návod na použitie so záručným listom

## Všeobecné informácie

LD Cardio je vysoko kvalitný kardiologický stetoskop pre lekárov. LD Cardio umožňuje auskultáciu v celom frekvenčnom rozsahu u dospelých a detí. Špeciálna geometria hlavy a membránového materiálu umožňujú sústrediť pozornosť počas auskultácie v strednom rozsahu, čo je veľmi dôležité pre počúvanie srdcových tónov. Frekvenčná charakteristika stetoskopu v rozsahu 200 - 500 Hz má výnimočnú citlivosť pre stetoskopy tejto triedy.

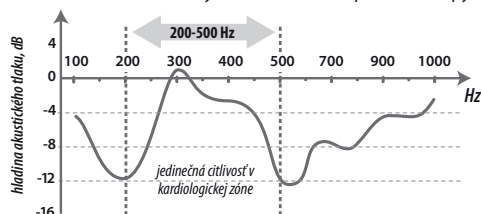

LD Cardio má vysoko kvalitný akustický systém prenosu zvuku z membrány do uší lekára. Hlava stetoskopu a zvukovo vodivá trubica majú dva zvukovo vodivé kanály, osobitne pre každé ucho. Oba zvukovo vodivé kanály sú kombinované do jedného, aby sa eliminoval hluk trenia proti sebe. Materiál zvukovodnej trubice, optimálna tuhosť pripevnených ušných vložiek a presnosť spojenia častí stetoskopu - čo najviac vylučujú vonkajšie a vlastné zvuky pri jeho používaní.

## Kompletná sada

Nº	Názov	Množstvo	Model	Poznámka
1	Hlava do stetoskopu	1 ks.	LD-S044	s membránou
2	Lekárska spojovacia trubica	1 ks.	LD-S043	s vnútornou pružinou a vstavanou binaurálnou trubicou
3	Ušné vložky (mäkké)	1 pár	LD-S046	
4	Ušné vložky (mäkké)	2 páry	LD-S046	zahrnuté v ďalšej sade príslušenstva

5	Membrána	1 ks.	zahrnuté v ďalšej sade príslušenstva
6	Puzdro na ďalšie príslušenstvo	1 ks.	zahrnuté v ďalšej sade príslušenstva
7	Jmenovka	1 ks.	
8	Návod na použitie so záručným listom	1 ks.	
9	Obal	1 ks.	

## Technické špecifikácie

Výkon	LD Cardio
Priemer membrány	44 mm
Dĺžka Trubice	56 cm
Prevádzkové podmienky:	
teplota	od 10 °C do 40°C
relatívna vlhkosť	85% a menej
Podmienky skladovania a prepravy:	
teplota	od mínus 34°C do 50°C
relatívna vlhkosť	85% a menej
Celkové rozmery v balení	440 (L) x 180 (Š) x 43 (H) mm
Hmotnosť bez obalu	200 g
Rok výroby	Rok a mesiac výroby sú uvedené na obale

## Starostlivosť, skladovanie, oprava a likvidácia

## ! DÔLEŽITÉ!!

1. Stetoskop musí byť chránený pred vysokou vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a nárazmi.
2. Stetoskop neskladujte ani nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievačov a otvoreného ohňa.
3. Chráňte stetoskop pred znečistením.
4. Kontakt stetoskopu s agresívnymi roztokmi nie je povolený.
5. V prípade potreby vykonajte opravy iba v špecializovaných organizáciách. Adresy organizácií poskytujúcich záručné služby sú uvedené v záručnom liste.
6. Pri likvidácii postupujte podľa platných predpisov vo Vašom regióne. Výrobca nestanovil žiadne osobitné podmienky na likvidáciu.

## Záručné povinnosti

1. Tento prístroj má záručnú dobu 2 roky od dátumu predaja. Záručná doba na manžetu a kompresor je 12 mesiacov od dátumu predaja.
2. Záručné povinnosti sa vydávajú so záručným listom pri predaji prístroja kupujúcemu.
3. Adresy organizácií poskytujúcich záručný servis sú uvedené v časti "Výrobca a autorizovaní zástupcovia" alebo na webovej stránke [www.littledoctor.sg](http://www.littledoctor.sg).

## DEKODOVACIE ZNAKY

CE Súlad so Smernicou Európskej Únie

EC REP Zastupiteľská kancelária v Európskej Únii



Výrobca



Dôležité: Prečítajte si Návod na použitie



Dátum výroby: YYYY - rok, MM



YYYY-MM - mesiac (uvedený na obale)



Chráňte pred vlhkosťou

Dátum výroby: YYYY - rok, MM - mesiac (uvedený na obale) Chráňte pred vlhkosťou.

Dátum vydania tohto Návodu na použitie je uvedený na poslednej stránke vo formulári EXXX/YYMM/NN, kde YY je rok, MM je mesiac a NN je číslo vydania.

## VÝROBCA A AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA

Výroba je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 13485.

Vyrába sa pod dohľadom a pre Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore.

**Výrobca:** Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Oficiálny zástupca v EÚ:** Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: [biuro@littledoctor.pl](mailto:biuro@littledoctor.pl)). Podrobnejšie informácie na webovej stránke [www.littledoctor.sg](http://www.littledoctor.sg)

Little Doctor

## ZÁRUČNÝ LIST

MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

ZÁRUČNÁ DOBA

MENO KUPUJÚCEHO

PODPIS KUPUJÚCEHO

DÁTUM PREDAJA

PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

VYPLNENÉ ZÁSTUPCOM AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO STREDISKA

PEČÄŤ (PEČIATKA) OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE