

LD Prof-Plus
LD Prof-I
LD Prof-II
LD Prof-III
LD Prof-IV

Little Doctor®

Стетоскоп LD

Руководство по эксплуатации

Стетоскоп LD

Інструкція з експлуатації

Стетоскоп LD

Пайдалану жөніндегі басшылық құжат

RUS

UKR


KAZ



! ВАЖЛИВО!

Перед використанням стетоскопа уважно вивчіть цю інструкцію з експлуатації.

LD PROF-PLUS

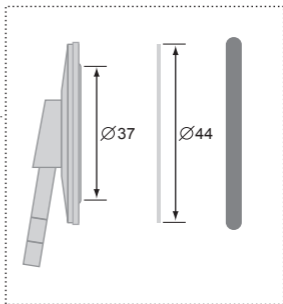


Опис: стетоскоп LD Prof-Plus – це фонендоскоп для прослуховування тонів Короткова, який складається з головки у вигляді діафрагми з пластиковою мембраною, з'єднувальної трубки, бінауральних трубок і вушних наконечників.

Комплектація:

- Головка до стетоскопу (LD-S025) з легкого металу з мембраною (LD-S023) діаметром 44 мм – 1 шт.
- Трубка медична з'єднувальна (LD-S020) довжиною 56 см (трубки можуть постачатися наступних кольорів: чорний, сірий, червоний, синій, фіолетовий, зелений, жовтий) – 1 шт.
- Трубки бінауральні (LD-S019) – 1 шт.
- Вушні наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритні розміри в упаковці, мм: 100 x 210 x 30

Маса без упаковки, г: 76

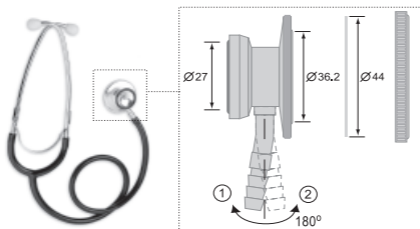


Опис: стетоскоп LD Prof-I – це стетофонендоскоп для лікарів і середнього медичного персоналу, що складається з двосторонньої головки у вигляді діафрагми з пластиковою мембраною і відкритого колокола, з'єднувальної трубки, бінауральних трубок і вушних наконечників.

Комплектація:

- Головка до стетоскопу (LD-S017) – двостороння з легкого металу з великою діафрагмою і відкритим колоколом – 1 шт. Діаметр мембрани (LD-S023) – 44 мм. Колокол головки має контактне гумове кільце. Діаметр дзвони 27 мм. Простий і зручний механізм перемикання між колоколом і діафрагмою шляхом повороту головки навколо стрижневого клапана на 180 градусів. Вигин стрижневого клапана вказує на робочу сторону головки. Позиція 1 встановлює в робочий стан діафрагму, позиція 2 встановлює в робочий стан колокол.
- Трубка медична з'єднувальна (LD-S020) довжиною 56 см (трубки можуть постачатися наступних кольорів: чорний, сірий, червоний, синій, фіолетовий, зелений, жовтий) – 1 шт.
- Трубки бінауральні (LD-S019) – 1 шт.
- Вушні наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритні розміри в упаковці, мм: 100 x 210 x 30

Маса без упаковки, г: 135

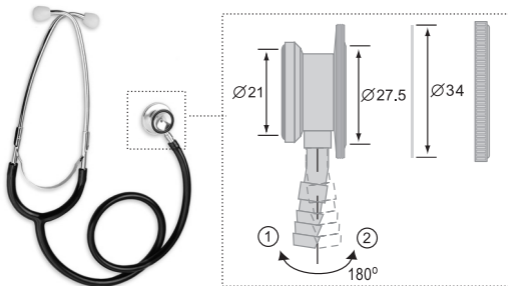


Опис: стетоскоп LD Prof-II – це спеціалізований педіатричний стетофонендоскоп, що складається з двосторонньої головки у вигляді діафрагми з пластиковою мембраною і відкритого колокола, з'єднувальної трубки, бінауральних трубок і вушних наконечників.

Комплектація:

- Головка до стетоскопу (LD-S028) – двостороння з легкого металу зі зменшеними діафрагмою і відкритим колоколом – 1 шт. Діаметр мембрани (LD-S024) – 34 мм. Колокол головки має контактне гумове кільце. Діаметр колокола 21 мм. Простий і зручний механізм перемикання між колоколом і діафрагмою шляхом повороту головки навколо стрижневого клапана на 180 градусів. Вигин стрижневого клапана вказує на робочу сторону головки. Позиція 1 встановлює в робочий стан діафрагму, позиція 2 встановлює в робочий стан дзвін.
- Трубка медична з'єднувальна (LD-S020) довжиною 56 см (трубки можуть постачатися наступних кольорів: чорний, червоний, синій, фіолетовий, зелений) – 1 шт.
- Трубки бінауральніє (LD-S019) – 1 шт.
- Вушні наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритні розміри в упаковці, мм: 100 x 210 x 30

Маса без упаковки, г: 95

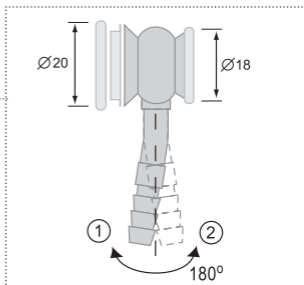


Опис: стетоскоп LD Prof-III – це спеціалізований неонатальний стетофонендоскоп, що складається з двосторонньої головки у вигляді діафрагми з пластиковою мембраною і відкритого колокола, з'єднувальної трубки, бінауральних трубок і вушних наконечників.

Комплектація :

- Головка до стетоскопу (LD-S037) – двостороння з легкого металу з малими діафрагмою і дзвоном – 1 шт. Діаметр мембрани (LD-S040) – 20 мм, діаметр колокола 18 мм. Простий і зручний механізм перемикання між діафрагмою і дзвоном шляхом повороту головки навколо стрижневого клапана на 180 градусів. Вигин стрижневого клапана вказує на робочу сторону головки. Позиція 1 встановлює в робочий стан діафрагму, позиція 2 встановлює в робочий стан колокол.
- Трубка медична з'єднувальна (LD-S020) довжиною 56 см (трубки можуть постачатися наступних кольорів: чорний, червоний, синій, фіолетовий, зелений) – 1 шт.
- Трубки бінауральні (LD-S019) – 1 шт.
- Вушні наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритні розміри в упаковці, мм: 100 x 210 x 30

Маса без упаковки, г: 85

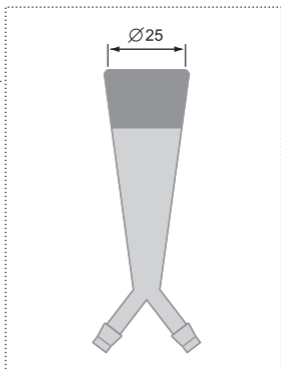

Опис: стетоскоп LD Prof-IV – спеціалізований акушерський стетоскоп, що складається з головки у вигляді колокола, з'єднувальної трубки, бінауральних трубок і вушних наконечників.

Комплектація:

- Головка до стетоскопу (LD-S038) – легка металева конусоподібної форми з пластиковим колоколом – 1 шт. Діаметр колокола – 25 мм.
- Трубки медичні з'єднувальні (LD-S039) – дві звукопровідні трубки з латексу довжиною 56 см (трубки можуть постачатися наступних кольорів: чорний, синій, фіолетовий, зелений) – 1 компл.
- Трубки бінауральніє (LD-S019) – 1 шт.
- Вушні наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритні розміри в упаковці, мм: 100 x 210 x 30

Маса без упаковки, г: 115

! ВАЖЛИВО!

1. Стетоскоп необхідно оберігати від підвищеної вологості, прямих сонячних променів, ударів.
2. Не зберігайте та не використовуйте стетоскоп в безпосередній близькості від обігрівальних приладів та відкритого вогню.
3. Оберігайте стетоскоп від забруднення.
4. Не допускається контакт стетоскопа з агресивними розчинами.
5. При необхідності здійсніть ремонт тільки в спеціалізованих установах. Адреси установ, що здійснюють гарантійне обслуговування вказані в гарантійному талоні.
6. Термін служби 7 років з моменту передачі стетоскопа споживачеві. Рік і місяць виробництва вказані на упаковці.
7. Після закінчення встановленого терміну служби необхідно періодично звертатися до фахівців (спеціалізовані ремонтні установи) для перевірки технічного стану стетоскопа.
8. При утилізації керуйтеся діючими в даний час правилами в Вашому регіоні. Спеціальних умов утилізації виробником не встановлено.
9. Умови експлуатації: температура від + 10 °С до + 40 °С; відносна вологість 85% або нижче. Умови зберігання і транспортування: температура від -34 °С до + 50 °С; відносна вологість 85% або нижче.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. На даний стетоскоп встановлено гарантійний термін протягом 24 місяців з дати продажу.
 2. Гарантійні зобов'язання оформлюються гарантійним талоном при продажу приладу покупцеві. Гарантійний талон розташований на останній сторінці цієї інструкції.
 3. Гарантія не поширюється на товари, які вийшли з ладу і/або отримали дефекти внаслідок: застосування не за призначенням; необережного використання, що призвело до пошкоджень; модифікації; ремонту неуповноваженою установою (приватною особою); порушення правил експлуатації, і/або зберігання, та/або транспортування; дій третіх осіб або непереборної сили.
- Вимагайте заповнення гарантійного талона торгівельною установою при покупці стетоскопа.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УКРАЇНА: Безкоштовна інформаційна лінія 0-800-30-12-08

Виробництво сертифіковане за міжнародним стандартом ISO13485. Стетоскопи LD відповідають вимогам ГОСТ 50444-92 Держстандарту Росії.

Відповідає вимогам Технічного регламенту України щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р №753.

✉ Претензії споживачів та побажання надсилати за адресою офіційного імпортера:

Україна: а/с 123 м. Київ, 03049, „Ергоком” ТПК ПП

Тел. безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-12-08

Продукт компанії: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore (Літл Доктор Інтернешнл (С) Пте. Лтд., 7500А, Біч Роад, 11-313 Зе Плаза 199591, Сінгапур). Поштова адреса: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699 (Ішун Централ, Поштова скринька 9293, Сінгапур, 917699).


Експортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Літл Доктор Інтернешнл (С) Пте. Лтд.)


Виробник: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PR China (Літл Доктор Електроник (Нантонг) Ко., Лтд., Ном. 8, Тонгксінг Роад Економіка енд Технікал Девелопмент Еріа, 226010 Нантонг, Джіангсу, КНР).

Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком” вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua


Інформація про медичну техніку марки LD в Інтернеті (технічні характеристики, функціональні особливості, умови експлуатації, зберігання та гарантійного обслуговування): www.littledoctor.ua


РОЗШИФРОВКА СИМВОЛІВ:


 Відповідність Директиві Євросоюзу


 Представник в Євросоюзі

 Виробник

 Важливо: Прочитайте інструкцію

 Знак відповідності України

 Дата виробництва: YYYY – рік, MM – місяць (вказано на упаковці)

 Берегти від вологи

Дата редакції цієї Інструкції з експлуатації вказана на останній сторінці у вигляді IXXX/YYYY/NN, де YY – рік, MM – місяць, а NN – номер редакції.

www.LittleDoctor.ua

Інформація про медичну техніку марки LD в Інтернеті (технічні характеристики, функціональні особливості, умови експлуатації, зберігання та гарантійного обслуговування).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ /
САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ АТАУЫ МЕН МЕКЕН-ЖАЙЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / ДАТА
ПРОДАЖУ / САТЫЛҒАН КҮНІ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА /
ПІДПИС ПРОДАВЦЯ /
САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ

ПЕЧАТЬ (ШТАМП) ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
ПЕЧАТКА (ШТАМП) ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ /
САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ МӨРІ (МӨРТАБАНЫ)

Внешний вид проверил, товар в полной
комплектации получил:

З умовами гарантійного обслуговування
ознайомлений, зовнішній вигляд перевірів,
товар в повній комплектації одержав:

Кепілдемелік қызмет көрсету Шарттарымен
таныстым, сыртқы түрін тексердім, толық
жиынтығындағы товарды қабылдап алдым:

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ /
ПІДПИС ПОКУПЦЯ /
САТЫП АЛУШЫНЫҢ ҚОЛЫ

www.LittleDoctor.sg

